

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK **Pro tvrdé a plynopropustné kontaktní čočky (RGP)**

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Tuto příbalovou informaci si prosím dobře přečtěte a uložte ji pro případné použití v budoucnu.

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK účinně čistí, uchovává a dezinfikuje oční čočky a zvyšuje jejich počáteční smáčivost, aby se docílilo pohodlného nošení jak čirých tak zbarvených silikon-akrylátových a fluorosilikon-akrylátových tvrdých plynopropustných kontaktních čoček. **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK** je jemný, účinný roztok, neobsahující chlorhexidin, thimerosal ani chlorid benzalkonia, pro uživatele silikon-akrylátových a fluorosilikon-akrylátových pevných plynopropustných kontaktních čoček. Používá se podle doporučení Vašeho očního specialisty.

POPIS:

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK je patentovaný, sterilní vodný roztok, jehož pH a tonicity jsou upraveny pufrem na hodnoty oka. Obsahuje **AL 12355** charakteristický zvlhčující/uchovávající polymerový systém, polyetylenglykol, poloxamin, kyselinu boritou a propylenglykol a je konzervován pomocí antimikrobiální substance **POLYQUAD®** (chlorid polidronia) 0,0011% a edetanem disodným 0,01%.

ÚČINEK:

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK odstraňuje z povrchu čočky bílkoviny a tuky a pomáhá udržet těžko odstranitelné usazeniny mimo čočky.

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK je vyvinut také pro oplachování čoček, což pomáhá odstranit z čočky uvolněné povrchové usazeniny. Pro pohodlné vkládání čočky do oka je čočka změkčena pomocí zvláštního patentovaného polymerového systému, který umožňuje také lepší a rovnoměrné smáčení čočky. Toto složení poskytuje pohodlí a úlevu při nošení kontaktních čoček. Obsahuje patentovaný systém stabilizačních činidel, který se osvědčil jako velmi účinný při likvidaci patogenních mikroorganismů. **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK** je účinný při čištění, dezinfekci a uchování čoček a je dobře snášen oční tkání po vložení čoček. Žádný další denní čištění pro péči o čočky není nutný.

POUŽITÍ (Indikace):

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK je indikován pro čištění, dezinfekci, uchování a oplachování čirých a zbarvených fluorosilikon-akrylátových a silikon-akrylátových tvrdých plynopropustných kontaktních čoček, jak pro denní tak dlouhodobé nošení.

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK lze používat jako rozpouštědlo pro **OPTI-FREE® SUPRACLENS® Active Cleaner** pro enzymatické čištění.

KONTRAINDIKACE (kdy by se neměl přípravek používat):

UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK se nepoužívá pro měkké kontaktní čočky.

Nepoužívejte pro tepelnou dezinfekci.

Přípravek by neměli používat pacienti alergičtí na některou ze složek přípravku **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK**.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce.

Pracujte vždy pouze s jednou čočkou, levou nebo pravou, jako s první, tak aby se předešlo záměně.

Používáte-li nové pouzdro na čočky, opláchněte je přípravkem **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK** nebo podle doporučení Vašeho očního specialisty. Společnost Alcon doporučuje častou výměnu pouzdra.

POKYN PRO PÉČI O VAŠE ČOČKY:

Čočku vyjměte a opatrně promněte její obě strany s 2 až 4 kapkami přípravku **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK** nebo jiným denním čistícím přípravkem podle doporučení Vašeho očního specialisty. Neopomeňte promnout obě strany čočky.

Čočky důkladně opláchněte podle doporučení Vašeho očního specialisty.

Naplňte pouzdro na skladování čoček čerstvým přípravkem **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK** tak, aby byly čočky zakryty. Vložte čočky do pouzdra a zkontrolujte, zda jsou opravdu zcela ponořeny. Pouzdro pevně uzavřete.

Ponechte čočky v uzavřeném pouzdře přes noc nebo alespoň po dobu čtyř hodin.

Po vyjmutí čoček z pouzdra můžete čočky rovnou nasadit. Pro snazší nasazení můžete před vložením nakápnout na vnitřní stranu čočky kapku přípravku **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK**.

Po vyjmutí čoček z pouzdra obsah pouzdra vylijte, pouzdro vypláchněte a ponechte jej na vzduchu oschnout.

VAROVÁNÍ:

Je důležité, abyste se řídili pokyny svého očního specialisty a dodržovali instrukce pro řádné používání a péči o Vaše kontaktní čočky a pro práci s přípravky pečujícími o čočky. Pokud máte přetrvávající nepříjemné pocity v oku, dochází k nadměrnému slzení, změnám vidění nebo Vaše oko zčervená, **IHNED** čočky vyjměte a poraďte se se svým očním specialistou, protože daný problém se může i zhoršit.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte vždy čerstvý **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK**. Roztok v pouzdru na oční čočky nepoužívejte nikdy znovu.

Vaše čočky je třeba očistit a dezinfikovat při každém vyjmutí z očí.

Po čištění doporučeném Vaším očním specialistou **ČOČKY VŽDY DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE**, aby se odstranily uvolněné povrchové usazeniny.

Nepoužívejte mýdlo, detergenty nebo jiné přípravky na čištění v domácnosti.

Aby se zamezilo kontaminaci, nedotýkejte se nikdy hrotem kapátka lahvičky jakéhokoliv povrchu ani jej nepřenášejte na jiné lahvičky.

Pokud přípravek nepoužíváte, uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou.

Po použití nasadte opět uzávěr.

Skladujte při pokojové teplotě.

Používejte pouze do data použitelnosti, které je vyznačené na lahvičce a na obalu (Exp.).

Šest měsíců po prvním otevření zbytek roztoku zlikvidujte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení:

Přípravek **UNIQUE-PH™ VÍCEÚČELOVÝ ROZTOK**, který je sterilizován kombinací páry a filtrace, je dodáván v plastových lahvičkách o objemu 45 ml až 120 ml (**STERILNÍ A**).

Pouzdro na čočky

DISTRIBUTOR

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o.

Sokolovská 77–79, 186 00 Praha 8, Česká republika

tel.: + 420 221 115 250, fax: + 420 221 115 251

VÝROBCE:

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

Fort Worth, TX, USA 76134-2099

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EU:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.

Boundary Way, Hemel Hempstead

Hertfordshire

HP2 7UD Velká Británie

U.S. Patent č. 4,525,346 a 4,407,791; EP Patent č. 076 136 a dosud nevyřízená přihláška U.S. patentu č. 93911061.5

© 2001 Alcon Laboratories, Inc.

CE 0123